


### Kiedy należy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora Turbuhaler®?

Okienko wskazuje ile dawek pozostało w inhalatorze Turbuhaler®.

Pełny inhalator zawiera 60 lub 120 dawek leku.

Podziałka licznika dawek jest oznaczona co 10 inhalacji.

Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka, oznacza to, że należy rozpocząć korzystanie z nowego inhalatora Turbuhaler®.

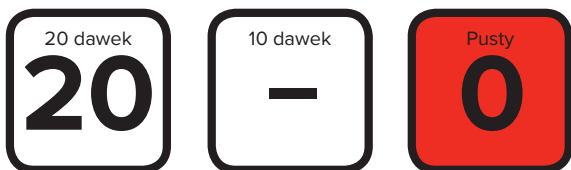

### Nie czuję smaku po przyjęciu dawki leku z inhalatora Turbuhaler®. Skąd pewność przyjęcia dawki leku?

Ilość leku zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego po inhalacji smak leku może nie być odczuwalny.

Jeżeli postępujesz zgodnie z instrukcjami, możesz mieć pewność, że dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach. W ciągu kilku minut oddychanie powinno stać się łatwiejsze.

### Czy muszę wstrzymać oddech po inhalacji?

W przypadku inhalatora Turbuhaler® nie ma potrzeby wstrzymywania oddechu po inhalacji.

### Czy muszę wstrząsać Turbuhaler®?


Nie trzeba wstrząsać inhalator Turbuhaler® przed użyciem.

### Czy dostępny jest film z instrukcją obsługi inhalatora Turbuhaler®?

Film z instrukcją, w jaki sposób prawidłowo używać inhalatora Turbuhaler® dostępny jest na stronie [www.turbuhaler.pl](http://www.turbuhaler.pl).

# TURBUHALER®

Uczyń życie łatwiejszym  
z wygodnym inhalatorem

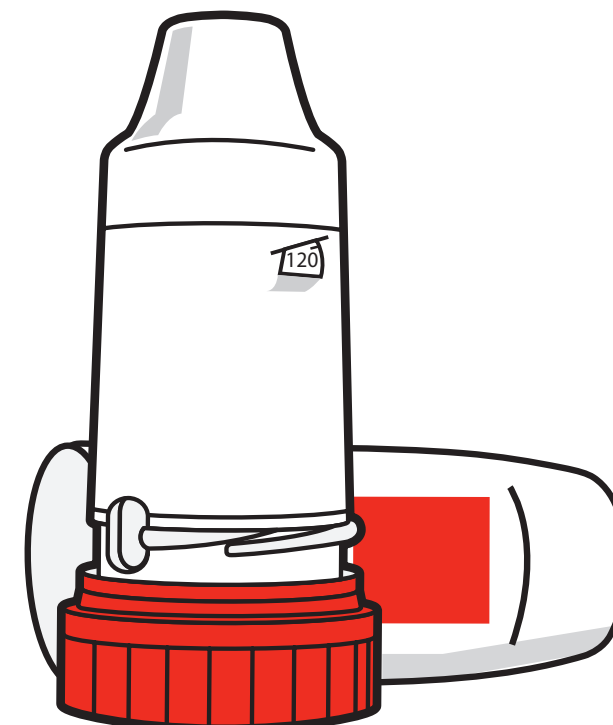

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce dla pacjenta. Zapytaj swojego Lekarza lub Farmaceutę jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące inhalatora Turbuhaler®.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.  
ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,  
tel. (22) 245 73 00, fax (22) 485 30 07  
[www.astrazeneca.pl](http://www.astrazeneca.pl)

SYMB/19/07/01\_npr  
Data przygotowania: Sierpień 2019

AstraZeneca

AstraZeneca

# Jak stosować inhalator Turbuhaler®?


W celu wykonania prawidłowej inhalacji wykonaj poniższe kroki:

## 1. ODKRĘĆ



Odkręć i zdejmij pokrywę inhalatora. Inhalator należy trzymać w **pozycji pionowej**, czerwonym pokrętłem do dołu.


## 2. KLIKNIJ

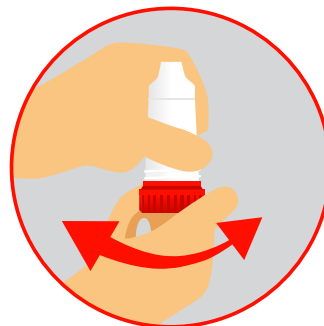

Aby załadować dawkę leku:


- 2.1 Przekręć czerwone pokrętło do oporu w **jednym kierunku**, a następnie do oporu w **przeciwnym kierunku** (kierunek, od którego rozpoczynasz przekręcenie pokrętła nie ma znaczenia).
- 2.2 Charakterystyczny dźwięk **“KLIK”** jest potwierdzeniem prawidłowego załadowania dawki.

## 3. WYKONAJ WYDECH

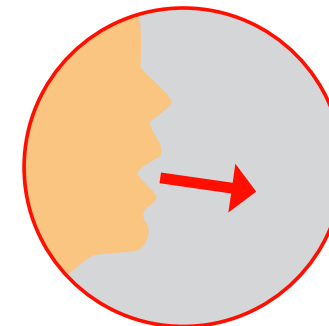

Wykonaj łagodny, niewymagający wysiłku wydech poza inhalator.


## 4. ZAINHALUJ

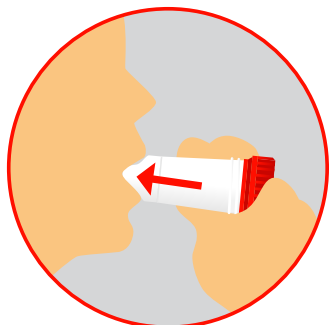

**INHALACJA:**

- 4.1 Umieść ustnik inhalatora między zębami.
- 4.2 Obejmij ustnik i wykonaj maksymalnie głęboki i natężony wdech.
- 4.3 Wyjmij inhalator z ust i wykonaj wydech **poza** inhalator.

## 5. WYPŁUCZ USTA

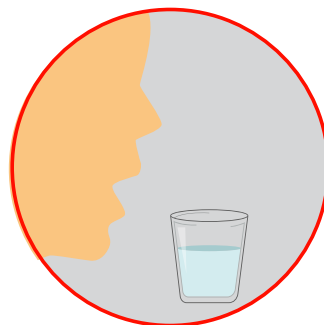

Wypłucz usta wodą zawsze po przyjęciu dawki.

## 6. ZAKRĘĆ INHALATOR



Pamiętaj, aby zakręcić inhalator po przyjęciu dawki.